



MOPEDIA®

MA RP190X_RPo191x_RP192x 02_A_ITA_09-2020

HLINÍKOVÉ HOLE **NÁVOD K OBSLUZE**

INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ	STRANA.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS	STRANA.4
71 Nastavení výšky	str. 4
8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	STRANA 4
9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ	STRANA 4
10. METODY POUŽITÍ.....	STRANA 5
11. ÚDRŽBA	STRANA 5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA 5
121 Čištění.....	str. 5
122 Dezinfekce	str. 5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA 5
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA 5
141 Náhradní díly a příslušenství	str. 6
15. ZÁRUKA.....	STRANA 6
16. OPRAVY	STRANA 6
161 Záruční opravy.....	str.6
162 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	str.6
163 Nebezpečné výrobky	str.7
17. NÁHRADNÍ DÍLY	STRANA.7
18. DOLOŽKY O VÝJIMCE.....	STRANA.7

 Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP190N Výškově nastavitelná hliníková hůl - černá barva

RP190V Výškově nastavitelná hliníková hůl - zelená barva

RP190R Výškově nastavitelná hliníková hůl - červená barva

RP191N Výškově nastavitelná hliníková hůl - černá barva se širokým hrotem

RP191V Výškově nastavitelná hliníková hůl - zelená barva se širokým hrotem

RP191R Výškově nastavitelná hliníková hůl - červená barva se širokým hrotem

RP192N Výškově nastavitelná hliníková hůl - černá barva s podstavcem pro čtyřnožku

RP192V Výškově nastavitelná hliníková hůl - zelená barva s podstavcem pro čtyřnožku

RP192R Výškově nastavitelná hliníková hůl - červená barva s podstavcem pro čtyřnožku

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali hůl BRIO z řady MOPEDIA by Moretti. Hole Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Hliníkové hole MOPEDIA je pomůcka ovládaná jednou rukou vhodná pro podporu a/nebo pomoc při pohybu osob s potížemi při chůzi

POZOR!



Je zakázáno používat tento výrobek k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce. Společnost MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím zařízení nebo použitím jiným, než je uvedeno v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny WALKING STRIPS jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.









Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod:

- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Dbejte na to, aby byl výrobek dodán nepoškozený, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž uživatel a/nebo pacient žije.
je pacient stanoven.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

Hole Mopedia jsou vyrobeny výhradně z hliníku a mají měkkou rukojeť ve tvaru T. Jejich výška je nastavitelná po 2,5 cm. Výše uvedené pomůcky jsou užitečné pro poskytnutí opory a jistoty. Hole také usnadňují stání a chůzi. Podporují odlehčení dolních segmentů těla, stabilizují osobu při problémech s rovnováhou a podporují ji při problémech se silou.

7.1 Nastavení výšky

Odšroubujte pojistný kroužek, stiskněte kolík a vytáhněte vnitřní trubku do otvoru v požadované výšce. Našroubujte pojistný kroužek.

8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

POZOR!



- Vždy zkontrolujte stav opotřebením dílů, abyste zajistili bezpečné používání zařízení pro osoby a majetek.
- Zkontrolujte správné zasunutí tlačítka do otvoru a montáž zařízení.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Na mokřem a kluzkém povrchu používejte s opatrností.
- Nenechávejte přístroj delší dobu venku a v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a robustnost výrobku a stav podpěrného hrotu. V případě opotřebením ji vyměňte.
- V případě pochybností o použití, nastavení nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.

- Abyste předešli jakémukoli riziku, uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

**POZOR!**

Nepřekračujte maximální hmotnost pacienta uvedenou na štítku výrobku a v kapitole "Technické specifikace" této příručky.

10. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Viz bezpečnostní upozornění v tomto návodu k použití.

Použití hole se liší případ od případu. To vyžaduje minimální školení specializovaného personálu s ohledem na typ kroku, který je třeba udělat, nebo typ opory. Ošetřovatel se přepíše o pacienta vždy staví na slabší nebo nemocnější stranu těla.

11. ÚDRŽBA

Přístroje řady MOPEDIA by Moretti jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje nechat si zkontrolovat vhodnost použití výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. Pravidelnou kontrolou se rozumí kontrola následujících částí:

- Struktura hole;
- Tipy.

Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

12.1 Čištění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, k odstranění obtížnějších nečistot použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím dobře osušte.

**POZOR!**

Používejte vodu o teplotě nejvýše 30 °C. Nepoužívejte pračky s proudem vody a/nebo páry.

12.2 Dezinfekce

Pokud je nutné výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

**POZOR!**

Rozhodně nepoužívejte kyselé, zásadité nebo rozpouštědlové produkty, jako je aceton nebo ředidlo.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE



Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci pevného komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

14. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

RP190N - RP190V - RP190R



NASTAVITELNÁ VÝŠKA od 72 do 95 cm



Maximální nosnost 110 kg

T-rukojeť s měkkou protiskluzovou gumovou rukojetí

Protiskluzová gumová špička

RP191N - RP191V - RP191R  **NASTAVITELNÁ VÝŠKA 74 AŽ 97 CM**

Maximální nosnost 110 kg

T-rukojeť s měkkou protiskluzovou pryžovou rukojetí 3bodová
protiskluzová pryžová krytka prstů se širokou základnou

RP192N - RP192V - RP192R

Nastavitelná výška od 74 do 97 cm

Maximální nosnost 110 kg

T-rukojeť s měkkou protiskluzovou gumovou rukojetí
Základna Quadripod se 4 protiskluzovými gumovými opěrnými body

14.1 Náhradní díly a příslušenství
RPR196 - Standardní černé hroty

RPR197 - Široká základna s černým hrotem

RPR198 - Černá základna pro čtyřnožku

RPR199 - Sada hrotů pro základnu čtyřnožky

15. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

16. OPRAVY
16.1 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společností Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

16.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

16.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

17. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy jste náhradní díl obdrželi. Náhradní díly a příslušenství naleznete výhradně v obecném katalogu Moretti.

18. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.