



**MOPEDIA®**

**VYCHÁZKOVÉ HOLE**

---

**NÁVOD K POUŽITÍ**

## INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
1.1 Kódy tříbodových holí .....	str.3
1.2 Kódy čtyřbodových holí .....	str.3
2. URČENÉ POUŽITÍ .....	STRANA.3
3. ÚVOD .....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA.4
6. SYMBOLY .....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS .....	STRANA.4
7.1 Nastavení výšky .....	str.4
7.2 Nastavení pravé nebo levé ruky.....	str.5
8. PŘED POUŽITÍM .....	STRANA.5
9. UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ .....	STRANA.5
10. JAK POUŽÍVAT.....	STRANA.5
11. ÚDRŽBA .....	STRANA.5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE .....	STRANA.5
12.1 Čištění.....	str.5
12.2 Dezinfekce .....	str.5
13. PODMÍNKA LIKVIDACE .....	STRANA.5
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STRANA.6
14.1 Technické vlastnosti.....	str.6
14.2 Technické vlastnosti .....	str.6
15. NÁHRADNÍ DÍLY .....	STRANA.6
16. ZÁRUKA .....	STRANA.7
16.1 Opravy .....	str.7
16.2 Náhradní díly .....	str.7
16.3 Doložky o výjimkách .....	str.7

 Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

### 1.1 Kódy třibodových holí

- RP719** Třibodová vycházková hůl  
**RP720** Třibodová hůl

### 1.2 Kódy čtyřbodových holí

- RP722** čtyřbodová vycházková hůl  
**RP723** čtyřbodová hůl- otevřená rukojeť  
**RP726** čtyřbodová hůl

## 2. URČENÉ POUŽITÍ

Třínohé a čtyřnohé hole Moretti jsou zařízení ovládaná jednou rukou, která jsou uzpůsobena k podpoře a/nebo usnadnění mobility osob s potížemi při chůzi.

## 3. ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zakoupili TŘÍ a/nebo ČTYŘBODOVOU HŮL Mopedia od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný výrobek, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete návod k obsluze. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

### POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

## 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny TRIPOD A QUADRIPOD je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:




1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moret- ti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod k použití
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- životnost servisu - limit používání zařízení je dán opotřebením dílů.
- Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobci a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.


## 6. SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečná identifikace zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Dávková šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace

## 7. OBECNÝ POPIS

Třínohé a čtyřnohé hole MOPEDIA jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových trubek. Dodávají se s protiskluzovými hroty z měkké pryže. Jsou výškově nastavitelné po 2,5 cm. Tyto pomůcky usnadňují stání a chůzi. Poskytují osobě stabilitu z hlediska rovnováhy a oporu při problémech se silou. Maximální hmotnost uživatele 130 kg. Pro model pro dospělé (pro RP719-RP722 100 kg).

### 7.1 Nastavení výšky nohou

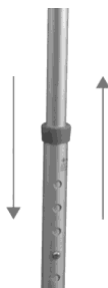

Chcete-li nastavit výšku, stiskněte tlačítko a posuňte hůl do požadované výšky. Po dokončení se ujistěte, že je tlačítko zcela vysunutě v požadovaném otvoru.

## 7.2 Pro nastavení pravé nebo levé ruky použijte

Stiskněte tlačítko a otočte rukojeť o 180 stupňů. Ujistěte se, že je tlačítko zcela vysunuto do požadovaného otvoru na druhé straně hole.

## 8. PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozen, aby bylo zaručeno bezpečné používání pro osoby a věci.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení

## 9. UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Na mokrém a kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** u pacientů, jejichž hmotnost přesahuje hmotnost uvedenou na štítku výrobku a v kapitole o technických vlastnostech této příručky.
- Nenechávejte přístroj dlouho v kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte jeho pevnost, stabilitu a dobrý stav gumových koncovek. Po opotřebení je vyměňte
- V případě pochybností o používání, seřizování nebo údržbě se obraťte na svého prodejce.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

## 10. JAK POUŽÍVAT

Zařízení držte opačnou rukou než je slabší noha a delší stranou opěrné základny směrem dovnitř. Přeneste zařízení dopředu společně s chodidlem slabé nohy a zatěžte celou vahou silnější nohu. Při chůzi dávejte pozor, abyste zařízení neumístili ani příliš blízko k tělu, abyste nezakopli o jednu ze špiček, ani příliš daleko, aby nedošlo k nerovnováze. V případě použití na schodech zkontrolujte, zda jsou schody dostatečně velké, aby se na ně vešla základna zařízení. Poté bude muset osoba zvednout první silnější nohu, následně zařízení a poté slabší nohu. Dolů po schodech se zařízením musí jít zraněná noha a nakonec dobrá noha. V případě potřeby si nechte pomoci od asistenta.

## 11. ÚDRŽBA

Zařízení Mopedia od společnosti MORETTI jsou pečlivě kontrolována a po uvedení na trh jsou opatřena značkou ES. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří každé 2 roky. V případě opravy použijte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## 12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 12.1 Čištění

K čištění pomůcky a konstrukce použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla (ve stejném poměru) smíchaný s vodou.

### POZOR!



**Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů.**

Výrobní společnost nenese odpovědnost za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

### 12.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.

## 13. PODMÍNKA LIKVIDACE

V případě likvidace zařízení nepoužívejte běžný kontejner na komunální odpad. Doporučujeme zařízení odevzdat na příslušných místech k recyklaci.

## 14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

### 14.1 Technické vlastnosti třibodová hůl

Kódy	Maximální hmotnost uživatele	Nastavitelná výška	Rukojeť	Základna
RP719	100 kg	Od 76 do 98 cm	Brachiální podpůrná rukojeť	
RP720	130 kg	Od 75 do 97 cm	Anatomicky tvarovaná otevřená rukojeť	

### 14.2 Technické vlastnosti čtyřbodová hůl

Kódy	Maximální hmotnost uživatele	Nastavitelná výška	Rukojeť	Základna
RP722	100 kg	Od 76 do 98 cm	Brachiální podpůrná rukojeť	
RP723	130 kg	Od 75 do 95 cm	Anatomicky tvarovaná otevřená rukojeť	
RP726	130 kg	Od 75 do 95 cm	Anatomicky tvarovaná otevřená rukojeť	

## 15. NÁHRADNÍ DÍLY

### RV7036 (4ks)



Gumové hroty Ø14 mm (RP726)

### RV7033 (2ks)



Gumové hroty Ø18 mm (RP72x)

## 16. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu ( dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s nimi. Moretti Moretti neručí za poškození nebo závady výrobků za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava , poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno) použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná úprava, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti ) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.

### 16.1 Opravy

**Záruční opravy V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada,** společnost Moretti se zákazníkem potvrdí, zda se na závadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může dle svého uvážení provést záruční opravu nebo výměnu u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti. Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

**Oprava, na kterou se nevztahuje záruka** Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu v případě opravy, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců ode dne obdržení opraveného výrobku.

**Zařízení bez vady** Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník .

### 16.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

### 16.3 Doložky o vynětí

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás některé výhrady a omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne (datum) \_\_\_\_\_

Maloobchodní p r o d e j c e \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com** e-mail:**info@morettispa.com MADE IN P.R.C.**





