

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STOJAN NA UMYVADLA

Ref. 307,72 a 307,70



## 0 – Váš model

Děkujeme, že jste si zakoupili držák umyvadla od společnosti Villard. Abyste jej mohli bezpečně používat a využívat všech výhod tohoto článku, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod a řídit se jeho doporučeními.

Tato příručka musí být bezpečně uchována a musí být k dispozici a přístupná každému uživateli. Použití tohoto materiálu je přísně omezeno na to, co je popsáno v tomto návodu.

## 1 - Přehled — Obecný popis

Držáky umyvadel VILLARD jsou navrženy pro použití v nemocnicích kvalifikovaným a vyškoleným zdravotnickým personálem.

## 2 - Provoz

### 2.1 - Kontrola při dodání

Po převzetí zkontrolujte celý obal a předměty. Naše zařízení je expedováno v kartonu na paletě.

Při dodávce pečlivě zkontrolujte, zda zařízení během přepravy neutrpělo žádné otřesy a zda nedošlo k deformaci nebo poškození. V takovém případě zásilku odmítněte. Zboží bude vráceno dodavateli na náklady přepravce. Pokud dopravce odejde dříve, než zjistíte poškození, máte 3 dny na to, abyste dopravci předložili reklamaci doporučeným dopisem s potvrzením o opětovném převzetí. Můžete kontaktovat naši službu na čísle +332 85 29 05 00, která vám s tímto postupem pomůže.

### 2.2 - Obecná kontrola

Zkontrolujte shodu dodaného materiálu s vaší objednávkou (číslo položky, možnosti a příslušenství, uživatelská příručka).

Zkontrolujte celkový stav držáků umyvadla.

### 2.3 - Před použitím

Zkontrolujte celkový stav držáků umyvadla

Zkontrolujte těsnost kol a příslušenství.

Zkontrolujte správnou funkci kol, která by se měla plně otáčet, a také správnou funkci brzd.

### 2.4 - Příslušenství

Zkontrolujte nerezovou misku (3 litry)

## 2.5 - Přemístění držáků umyvadla

### Před přemístěním držáků umyvadla

- Zkontrolujte, zda nejsou aktivovány brzdy.
- Zkontrolujte, zda se na zemi nenachází žádná překážka

## 3 - Bezpečnostní pokyny



### Čištění

- Čištění by mělo být prováděno měkkým a suchým hadříkem
- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo kyselé látky
- Nečistěte proudem vody, párou nebo tlakovým zařízením

To by mohlo vést ke špatné funkci a mimo záruku.

## 4 - Příslušenství

Naše příslušenství bylo speciálně navrženo pro stůl VILLARD. Zřídíme se jakékoli odpovědnosti za použití a kombinaci materiálů a příslušenství s jakoukoli jinou značkou. Toto je na výhradní odpovědnost uživatele.

## 5 - Návod k použití a bezpečnost

### 5.1 Návod k použití

Použití tohoto materiálu je přísně omezeno na to, co je popsáno v této příručce a je prováděno vyškoleným zdravotnickým personálem.

### 5.2 Varování

Nepoužívejte držáky umyvadel VILLARD, pokud je některý prvek rozbitý, poškozený nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

### 5.3 Bezpečnostní pokyny

Pravidelně kontrolujte těsnost koleček a kroužků držáků misek

Všechna spojovací zařízení musí být vždy řádně dotažena a pravidelně kontrolována a v případě potřeby znovu dotažena.

## 6 - Čištění

Pečlivé čištění držáků umyvadla je třeba provádět tak často, jak je to nutné, a alespoň jednou denně.

Doporučení výrobce jsou dána k udržení vašeho zařízení v dobrém stavu co nejdéle. Nenahrazují však protokol o čištění a dezinfekci schválený hygienickou službou provozovny pomocí držáků umyvadel.

předchozí:

Zařízení musí čistit a dezinfikovat vyškolený a informovaný personál nemocnice. Používané produkty jsou detergenty a dezinfekční roztoky schválené FSHH.

Nikdy nepoužívejte čistý alkohol, čisticí prášek, koncentrované prostředky, agresivní nebo abrazivní (tvrdé kartáče nebo drátěnky), které by mohly výrobek poškodit.

## Čištění:

Postup čištění spočívá v odstranění nečistot a skvrn, které se mohou na držácích umyvadla nacházet.

Použijte hadřík s roztokem saponátu, očistěte všechny povrchy vozíku od shora dolů a dokončete čištění koleček.

Vyčištěné části otřete jiným hadříkem a vždy otírejte shora dolů podle doporučení dodavatele čisticího roztoku.

## Dezinfekce:

Dezinfekci nanášejte novým hadříkem nebo použijte sprej na celou plochu vždy odshora dolů na vozík. Respektujte dobu působení dezinfekčního prostředku. Před použitím držáků umyvadla dodržujte dobu schnutí a dodržujte doporučení dodavatele.

## Upozornění:

- \* Zabraňte kontaktu dezinfekčního prostředku s očima, kůží a sliznicemi.
- \* Nikdy nemíchejte různé mycí prostředky dohromady.
- \* Respektujte procento ředění.

## 7 - Údržba

**DŮLEŽITÉ:** Bezpečnost a životnost vašeho zařízení přímo závisí na pravidelnosti a dodržování pravidel údržby.

Údržbu a opravy je nutné provádět vždy, když je to nutné, nebo alespoň jednou ročně.

### Činnosti údržby, které je třeba provádět pravidelně:

- Zkontrolujte celkový stav držáků umyvadla a jeho příslušenství (misky)
- Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci žádného z dílů
- Zkontrolujte, zda jsou všechna spojovací zařízení řádně utažena
- Zkontrolujte stav kol jejich brzd, pokud jsou jimi vybavena.

Vaše oddělení údržby by mělo vést záznamy o službách údržby s popisem provedených akcí a jejich dat.

## 8 - Skladování a poprodejní služby

### 8.1 Pokyny pro skladování a použití

	Podmínky skladování	Podmínky použití
Teplota	0 °C - 40 °C	15 °C - 40 °C
Vlhkost vzduchu	od 20 do 60 %	od 40 do 80 %

### 8.2 Poprodejní služby

Pro technické informace nebo objednání náhradních dílů je naše oddělení k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 na čísle 0033 2 85 29 05 00.