



**MOPEDIA®**



**PODPĚRA NA WC  
RS908**

**Návod k obsluze**

## OZNAČENÍ

RS908 Podpěra na WC

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení podpěry na WC MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

## ÚČEL POUŽITÍ

Podpěra na WC zajistí zdravotně postiženým komfort při vykonávání potřeby.

## UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

## OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud neporozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před použitím tohoto výrobku, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

## OBECNÝ POPIS


Podpěra na WC, podpora při vykonávání potřeby, lakovaná ocel, nastavitelná šířka přizpůsobitelná k jakémukoli typu toalety. Polstrované područky pro lepší komfort, výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nástavci.

## MONTÁŽ

Výrobek je dodáván nesmontovaný, ale lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

### Obsah balení:

- Boční rám (2 ks)
- Spojovací tyč (2 ks)
- Nohy (4 ks)

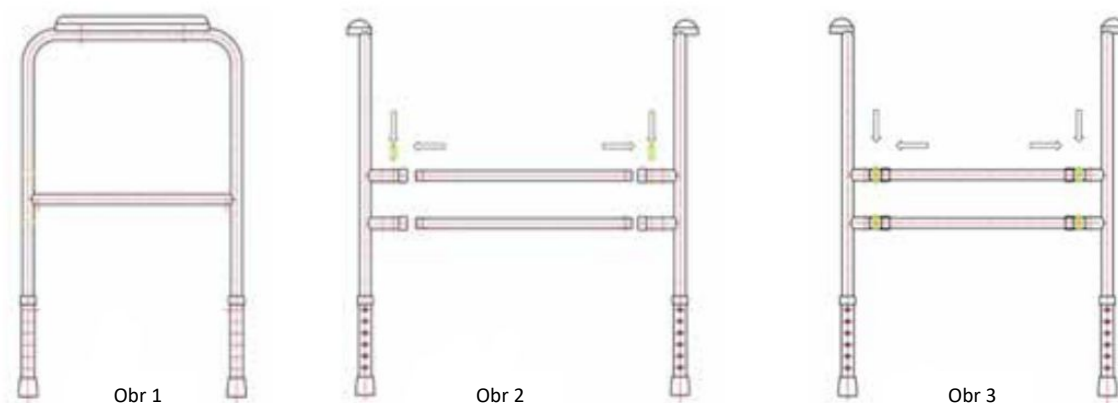

- Odstraňte veškerý obal a připravte všechny součástky pro montáž.
- Spojte dva boční rámy pomocí spojovacích tyček se svorky pro upevnění.
- Rám je nastavitelný na šířku, nastavte dle potřeby a zajistěte jej kolíkem na požadované místo.
- Jakmile jsou boční rámy kompletně sestaveny, můžete nastavit výšku nohou.

## PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není rám poškozený, aby bylo zaručeno bezpečné používání.
- Zkontrolujte správnou montáž výrobku.

## UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku
  - Vždy pomáhejte pacientovi s omezenou pohyblivostí posadit se na toaletu.
  - Podpěru nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na obalu.
  - Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění.
  - Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká, to může znesnadnit umístění pacienta.
  - Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utaženost šroubů a protiskluzové nožičky.
  - V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.
- !! Maximální nosnost nepřekračujte z jakéhokoli důvodu!!

## POUŽITÍ

RS908 – Pomůcka usnadňuje vstávání a posezení na toaletu. Ujistěte se, že na podpěru nepřenášíte celou váhu těla, protože tato pomůcka není pevná a jedná se pouze o PODPORU!

## ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchat s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

### Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

## PODMÍNKY LIKVIDACE

### Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

RS908 - rozměry: 55-60 x 50 x 68-78 cm; váha: 3 kg; maximální nosnost 110 kg.

\* Měření se vztahuje na celkové rozměry.

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OPRAVY

### Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

### Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

### Neoprávněná reklamacce

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

### NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

### OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň